

ПАМЯТКА

**В случае возникновения вопросов – звонить по
бесплатному номеру горячей линии проекта:**

8 800 100 68 38

Что нужно сделать, чтобы в рамках программы отправить материал для исследования?

ВАРИАНТ 1: Врач с доступом в Интернет (далее по тексту Вариант 1)

Воспользоваться электронной базой через сайт <https://aston-health.com/> и заполнить короткую анкету.

ВАРИАНТ 2: Врач без доступа в Интернет (далее по тексту Вариант 2)

Позвонить на горячую линию 8 800 100 68 38

Какие документы нужны для сопровождения отправляемого материала?

Требования действуют для отправки по Варианту 1 и Варианту 2

1. Письменное согласие пациента на обработку персональных данных и передачу гистологического блока (2 экз.)
2. Направление на анализ
 - распечатать из базы (для Варианта 1)
или
 - написать на врачебном бланке: ФИО пациента, ФИО врача, тип анализа (Для Варианта 2).

Какие требования к отправляемому материалу?

- На молекулярно-генетическое исследование должны направляться залитые в парафин опухолевые ткани, «архивные блоки», приготовленные из **операционного или биопсийного материала**.
- Материал может быть получен как из **первичного новообразования**, так и **из метастазов**.
- Время забора биологического материала не имеет значения.
- Перед отправкой необходимо убедиться, что содержание опухолевых клеток в препарате **не менее 20%**.
- Также важно уточнить, что материал был фиксирован **в 10% забуференном (нейтральном) формалине**, этаноле или ацетоне. непригодны для тестирования образцы ткани, зафиксированные кислым (незабуренным) формалином, фиксаторами Ценкера, Карнуа, Буэна.
- Фиксация должна быть проведена **не более чем через 1 час** после взятия ткани.
- К парафиновому блоку необходимо прикладывать **гистологический препарат**, полученный непосредственно из среза опухоли («стекло-отпечаток»).
- Для анализа на наличие мутаций достаточно предоставлять 1 образец опухолевого материала.

Какая процедура подготовки образцов к отправке?

1. Образцы опухолевой ткани помещаются в парафиновые блоки:
 - ✓ парафиновый блок старого образца – кусок парафина, размером 2х2 см, закрепленный на дощечке
 - ✓ парафиновый блок нового образца – кусок парафина, размером 4х3 см, залитый в пластиковый поддон
2. Для отправки парафиновые блоки запаковываются в картонную коробку.
3. Для отправки лабораторные стекла оборачиваются плотной бумагой, чтобы избежать боя во время транспортировки.
4. При отправке парафиновых блоков нескольких пациентов, блок каждого пациента упаковывается в отдельную коробку и маркируется (номер маркера должен соответствовать номеру гистологического заключения).
5. Отправка осуществляется посредством курьерской службы Курьер в течение 2-х рабочих дней после появления в базе информации «Материал готов к отправке» (Для Варианта 1 врач самостоятельно отмечает готовность к отправке; для Варианта 2 врач согласовывает с оператором горячей линии дату готовности материала к отправке) обязан забрать подготовленный к отправке блок(и) и передать его(их) в лабораторию.

Что необходимо положить в посылку / передать в лабораторию:

1. Упакованные блоки с образцами опухолевой ткани
2. Письменное согласие пациента на обработку персональных данных и передачу гистологического блока (2 экз.) (*Вариант 1 – скачать и распечатать из электронной базы: раздел Инструкции/Документы->Согласие пациента; для Варианта 2 – согласовать с оператором горячей линии способ получения документа*)
3. Направление на анализ (*Вариант 1 – распечатать из базы автоматически сформированное направление; Вариант 2 - написать направление в произвольной форме на 1) врачебном бланке или 2) обычном листе бумаги. ФИО врача и пациента писать разборчиво*).

ВНИМАНИЕ!!! НЕОБХОДИМА МАРКИРОВКА! Блоки, направительные бланки и согласия маркируются. Номер маркера упакованного блока должен совпадать с аналогичным номером на направлении и согласии и соответствовать номеру гистологического заключения.

**В случае возникновения вопросов – звонить по
бесплатному номеру горячей линии проекта:**

8 800 100 68 38